

Avantages produit:

- **Système léger sans fils, facile à déplacer de chambre en chambre en fonction de besoins.**
- Alerte en cas de chute ou d'errance même en dehors de la zone de détection.
- Double usage. (Chute et / ou errance nocturne).
- Rapport qualité / prix / fonctionnalités

Prévention:

- Eclairage du sol dès le lever du patient, pas de tapis au sol difficile à nettoyer, pas de câbles apparents.

Alerte: (détection de chute ou déplacement dans le sens lit / porte)

1. **Alerte immédiate si le patient n'est pas sensé se lever seul** (chute ou errance)
2. **Alerte temporisée si le patient peut se rendre aux toilettes** L'alerte n'est donnée que si le patient ne revient pas dans le délais imparti (chute ou errance)

Modes « soins »

désactivation temporaire pour soins de la surveillance avec remise en route temporisée ou manuelle

- Désactivation automatique par détection de déplacement dans le sens porte / lit (entrée de personnel)
- Activation / désactivation par touche sur le détecteur, télécommande murale ou pédale optionnelle,

Installation:


- Détecteur autonome sur batterie ou bloc secteur, posé au sol ou fixé au mur.
- Récepteur radio connecté simplement sur la prise appel malades existante ou en parallèle, bloc prise de courant ou bippeur au choix.



Report d'alarme:

- Système d'appel malades
- Bip avec affichage du N° de chambre, prise sonore, transmetteur téléphonique, etc...

Chute = Alarme
Errance = Alarme

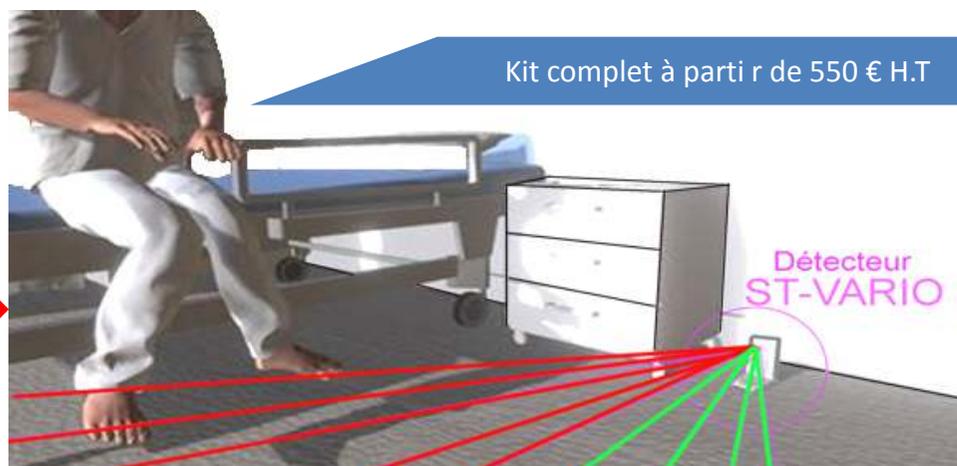

Soins, pas d'alarme
Retour lit, pas d'alarme

Configuration hospitalière ST-VARIO-HSP




www.stcom-France.com

Télécommande soins et configuration
Placé à l'entrée de la chambre (Radio)

Inclus dans le kit



Cordon appel malades en option

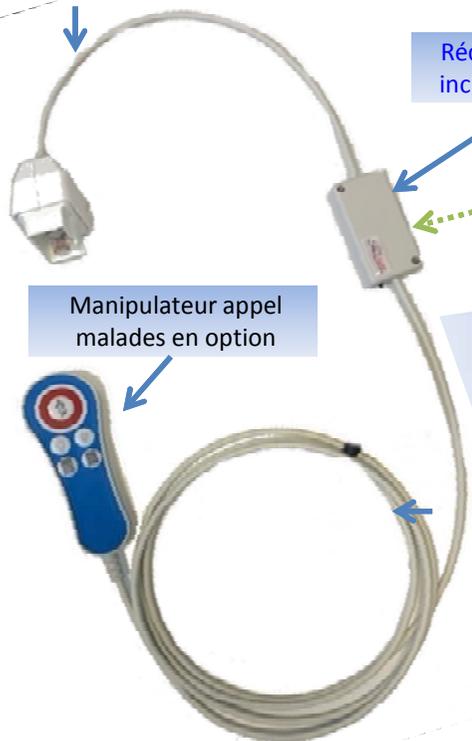

Manipulateur appel malades en option



Récepteur radio
inclus dans le kit

Kit complet 740,00 € H.T
(Hors connectique appel malades)

Déclencheur ST-VARIO
Sur accu +/- 4 jours
Et/ou bloc secteur inclus

Inclus dans le kit


- Activation mode soins
- Alarme sonore,
- Mode soin activé
- Batterie faible
- Mode nuit auto activé
- Test/ programmation
- Tempo en cours
- Touches de programmation
- Led éclairage du sol
- Base amovible




Éclairage
Prévention de chute

Connection Système appel malades


Ackermann / Ascom / Zettler / Tunstall
Télévic / Legrand / CRMS / Blick / etc...

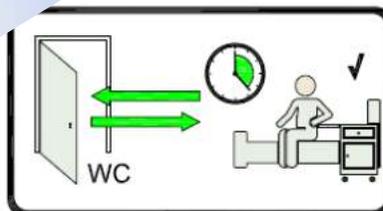

Alarme temporisée en cas de non retour au lit ou chute permettant d'aller aux toilettes

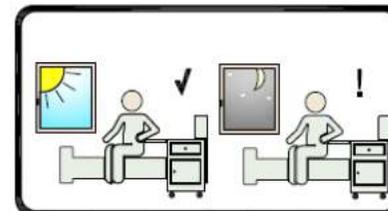

Mise en marche automatique En détection d'obscurité

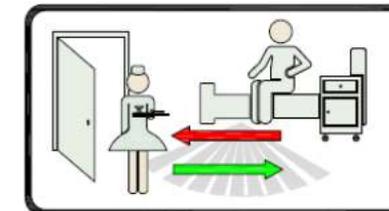

Détection du sens de franchissement (chute/soin)

Configuration maintien a domicile ST-VARIO-DOM

Kit complet récepteur prise 550 € H.T

Récepteur « bip »

- Alerte bipueur
- Affichage N°
- Sonore et vibrant



Option

Récepteur prise gigogne

- Alerte sonore
- Flash lumineux



Inclus dans le kit

Téléphone d'alarme Avec ou sans médaillon




Option


Déclencheur ST-VARIO
Sur accu +/- 4 jours
Et/ou bloc secteur inclus



Inclus dans le kit

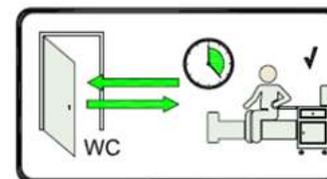

Alarme temporisée en cas de non retour au lit
ou chute permettant d'aller aux toilettes

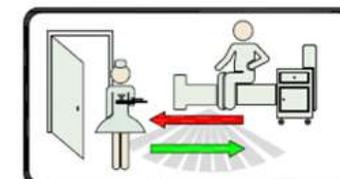


Détection du sens de
franchissement (chute/soin)

Accessoires / Options

Télécommande murale et supports

(Support mural et pédale en option, Télécommande incluse dans kit HSP)

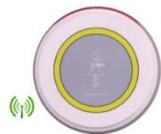

Télécommande radio avec support mural magnétique

- Fixation murale à l'entrée de la chambre
- Mode soin / Acquit
- Programmation
- Activation automatique sur détection d'obscurité

Inclus dans kit HSP



support mural magnétique

30,00 €



Socle d'activation mode soins au pied

+ voyants d'état rouge/vert

80,00 €

Réception des alarmes

(Autonome, sortie contact paramétrable, appel malades...)

Récepteur radio intégré à un manipulateur universel ,
Toutes marques disponibles



Nous consulter

Récepteur radio pour appel malades
Sortie contact sec NO/NF



Inclus dans kit HSP

Récepteur « bip »
Affichage N° chambre
Sonore et vibrant



349,00 €

Récepteur prise gigogne
• Alerte sonore
• Flash lumineux



Inclus dans kit DOM

Report télétransmission,
Vers GSM ou prestataire



Nous consulter

Emetteurs d'appel complémentaires

(activent les récepteurs ci-dessus en + du détecteur de chute)

Médaille bracelet



74,00 €

Médaille pendentif



74,00 €

Contacteur sur bras articulé radio



340,00 €

Emetteur mural ou de table



74,00 €

Contacteur au souffle radio



340,00 €

Détection de chute de fauteuil radio universel

- Le système se met en marche dès la détection de l'assise.
- La mise en marche est signalée par 2 bips sonores.
 - Emission d'un signal sonore (réglable), au lever de la personne.
 - Emission radio vers le récepteur connecté à l'appel malades.
- Le bouton central permet d'acquitter l'alarme.
- Le dispositif émet également un signal en cas de pile faible.
- Le dispositif émet également un signal en d'arrachement du câble de liaison

